

Meteen beginnen met ALHYDRAN

Speciaal voor de nazorg van de pas gesloten en kwetsbare huid is er ALHYDRAN. Zodra de wond dicht is en de hechtingen eruit zijn, kan de behandeling met ALHYDRAN beginnen.

Beschermend en vochtregulerend

ALHYDRAN is een medische, geconcentreerde, sterk vochtregulerende gel-crème. In ALHYDRAN wordt de kracht van vers verwerkte, zuivere aloë vera (Aruba Aloe Barbadosensis) gecombineerd met hoogwaardige ingrediënten als jojoba-olie, vitamine E en vitamine C. ALHYDRAN bevat geen toegevoegde geurstoffen en is huidvriendelijk.

Voorkomen van littekens

Direct nadat de wond dicht is, is de huid nog kwetsbaar en bezig zichzelf te herstellen. ALHYDRAN medische gel-crème draagt bij aan dit herstel en legt een beschermende laag over de kwetsbare huid.

ALHYDRAN

- een verminderde kans op jeuk en roodheid
- een verminderde kans op een afwijkend litteken
- een versneld herstel van de littekenhuid
- een toename van de elasticiteit van de huid
- minder littekenklachten

ALHYDRAN is op recept verkrijgbaar bij de apotheek in tubes van 30, 100 of 250 ml. Lees de bijsluiter voor gebruik.

Voor meer informatie: www.bap-medical.com/alhydran

ALHYDRAN : Uitvoerig klinisch gestest

ALHYDRAN is ontwikkeld voor de nabehandeling van brandwondenpatiënten en radiotherapiepatiënten. Het product is uitgebreid klinisch getest in diverse brandwondencentra, revalidatiecentra en ziekenhuizen in Europa waaronder de brandwondencentra van Gent (België), Rotterdam (Nederland) en Bad Klosterlausnitz (Duitsland)

BAPSCARCARE en ALHYDRAN combineren

Wanneer een litteken langdurig klachten veroorzaakt, kan ALHYDRAN gel-crème gecombineerd worden met siliconenproducten als BAPSCARCARE GEL en BAPSCARCARE T. De combinatie zorgt voor een effectievere littekenbehandeling.

ALHYDRAN in combinatie met BAPSCARCARE

ALHYDRAN is goed te combineren met BAPSCARCARE. Ongeveer 15 minuten voor het aanbrengen van de BAPSCARCARE GEL of BAPSCARCARE T de littekenhuid behandelen met ALHYDRAN. Eventueel overtollige gel-crème met een droge doek verwijderen.



	inhoud / formaat	CNK
BAPSCARCARE GEL	20 g	2755-817
	5 x 7 cm	2755-783
BAPSCARCARE T	10 x 15 cm	2755-809
	5 x 30 cm	2755-791



	inhoud	CNK
ALHYDRAN	30 ml	2462 612
	100 ml	2462 620
	250 ml	2462 638

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik ALHYDRAN en BAPSCARCARE verkrijgen?

Met een recept van de (huis)arts is ALHYDRAN of BAPSCARCARE rechtstreeks bij de apotheek verkrijgbaar.

Wanneer gebruik ik ALHYDRAN en wanneer BAPSCARCARE?

Stap 1: Meteen beginnen met ALHYDRAN. Zodra de wond dicht is en de hechtingen eruit zijn, kan de behandeling met ALHYDRAN beginnen. Hierdoor wordt (overmatige) littekenvorming voorkomen.

Stap 2: Vervelende littekens behandelen met BAPSCARCARE.

- BAPSCARCARE werkt helend en verzachtend als:
- Een litteken na wondsluiting langdurig rood blijft
 - Een vers litteken verdikt, groeit of klachten geeft
 - Een ouder litteken klachten geeft

ALHYDRAN en BAPSCARCARE kunnen zeer goed gecombineerd worden. De combinatie zorgt voor een effectievere littekenbehandeling.

Wanneer is mijn littekenbehandeling klaar?

De behandeling aanhouden totdat het litteken geen klachten meer geeft en/of in overleg met uw (huis)arts.

Welke informatie heeft een apotheek nodig om te bestellen?

	INHOUD/ FORMAAT	CNK	BESTELINFORMATIE
BAPSCARCARE GEL	20 g	2755-817	BAP Medical BVBA, België tel 051 24 00 07 fax 051 24 00 16 info@bap-medical.com www.bap-medical.com
BAPSCARCARE T	5 x 7 cm	2755-783	
BAPSCARCARE T	10 x 15 cm	2755-809	
BAPSCARCARE T	5 x 30 cm	2755-791	
ALHYDRAN	30 ml	2462 612	
ALHYDRAN	100 ml	2462 620	
ALHYDRAN	250 ml	2462 638	

Kan ik gewoon make-up blijven dragen als ik ALHYDRAN of BAPSCARCARE siliconengel gebruik?

Ja, beide producten zijn onzichtbaar en make-up is eenvoudig erover aan te brengen. Vergelijk het met een dagcrème waar je make-up over aanbrengt

Zijn er bijwerkingen aan het gebruik van ALHYDRAN of BAPSCARCARE?

Nee, er werden tot op heden geen bijwerkingen vastgesteld.



BAP Medical BV, Nederland
P.O. Box 531, 7300 AM Apeldoorn
tel +31 (0)55 355 25 80
fax +31 (0)55 355 91 98

www.bap-medical.com
info@bap-medical.com

BAP Medical BVBA, België
Bornstraat 6, B-8800 Roeselare
tel +32 (0)51 24 00 07
fax +32 (0)51 24 00 16

Last van een litteken?
Ervaar de helende werking
van siliconen

BAPSCARCARE

Patiënteninformatie



BAPSCARCARE siliconenproducten zijn op recept verkrijgbaar

Over littekens

Deze folder gaat over het voorkomen en / of behandelen van littekens en is bestemd voor mensen die iets willen doen aan een hinderlijk litteken.

Wat is een litteken?

Iedereen heeft wel ergens een litteken. Het is de natuurlijke reactie van het lichaam op een diepe beschadiging van de huid, bijvoorbeeld na een operatie of ongeval.

Op plaatsen waar de huid beschadigd is, gaat het lichaam aan de slag om die huid te herstellen. Als alleen de opperhuid beschadigd is, bijvoorbeeld bij een schaafwond, dan herstelt de huid zich meestal probleemloos en onzichtbaar. Maar als het gaat om een diepere wond, waarbij ook de onderliggende lederhuid schade heeft opgelopen, ontstaat er bij dat herstelproces vaak littekenweefsel. Het nieuw gevormde littekenweefsel is minder elastisch en mist een aantal functies die een gezonde huid wel heeft.

Klachten door littekens

Niemand is blij met een litteken. Het brengt in veel gevallen ongemak met zich mee en is vaak ontsierend. Een litteken veroorzaakt bijvoorbeeld:

- jeuk en pijn
- aanhoudende roodheid van de huid
- dikke roze 'strengen' op de huid
- een 'trekkend' gevoel, alsof de huid te strak staat
- minder bewegingsvrijheid van gewrichten

Is er iets te doen aan littekens?

Gelukkig bestaan er medische producten als ALHYDRAN (zie verderop in deze folder) en BAPSCARCARE, die het herstelproces van de huid stimuleren en versnellen. Zowel oude als verse littekens worden hierdoor vlakker, dunner en soepeler. Ze veroorzaken bovendien minder ongemak, pijn en jeuk. Bij tijdige behandeling is het mogelijk om vervelende en afwijkende littekens te voorkomen.

De helende werking van BAPSCARCARE

Als een litteken rood blijft of als klachten aanhouden, is het raadzaam om de huid te behandelen met BAPSCARCARE. Dit is een lijn van siliconenproducten voor de behandeling en het voorkomen van hinderlijke littekens. BAPSCARCARE is verkrijgbaar als siliconengel en als siliconenverband.

Littekenbehandeling met BAPSCARCARE

BAPSCARCARE is ontwikkeld voor oude en verse littekens, maar hoe eerder de littekenbehandeling gestart wordt, hoe kleiner de kans op een vervelend litteken. De siliconenverbanden en -gel zorgen ervoor dat littekens minder ontsierend worden: vlakker, soepeler en dunner. BAPSCARCARE vermindert bovendien klachten als een rode huid, het 'trekken' van het litteken, jeuk en bewegingsbeperking aan gewrichten.

Hoe werkt BAPSCARCARE?

De BAPSCARCARE siliconenproducten sluiten de huid als het ware af. Doordat het vochtgehalte van de huid zo beter op peil blijft, kan de beschadigde littekenhuid zich sneller herstellen. Een verdikt litteken zal vervagen en klachten zullen afnemen. Er kan op elk moment gestart worden met BAPSCARCARE. In het algemeen geldt: hoe eerder de siliconenbehandeling gestart wordt, hoe kleiner de kans op een blijvend litteken.

Voorkeur voor siliconen

Artsen en verpleegkundigen geven vaak de voorkeur aan medische siliconen voor de behandeling van littekens. Diverse wetenschappelijke studies hebben namelijk aangetoond dat deze siliconentherapie effectief en veilig is.

BAPSCARCARE is op recept verkrijgbaar als siliconengel en als siliconenverband.

BAPSCARCARE GEL SILICONENGEL

BAPSCARCARE GEL is de nieuwe generatie siliconengel voor de behandeling van zowel oude als verse littekens. Deze gel voelt niet olie-achtig aan en is verrijkt met vitamine E. Ideaal voor kleine littekens en littekens op gezicht, hals en huidplooien.

BAPSCARCARE GEL

- Voelt zijdezacht aan
- Is niet vettig en plakkerig
- Is snel droog
- Is onzichtbaar
- Is gemakkelijk aan te brengen
- Werkt overal op de huid

BAPSCARCARE GEL IS DE EERSTE KEUS IN GEBRUIK EN COMFORT!

Alle 121 testpanelleden (artsen en verpleegkundigen en willekeurige proefpersonen) geven aan dat BAPSCARCARE GEL prettiger in gebruik is dan andere siliconengels, en niet vettig en plakkerig is. Integendeel: BAPSCARCARE GEL voelt volgens hen zijdezacht aan en is direct droog. De testtubes waren onherkenbaar gemaakt (blinde test) en werden na elkaar aangebracht.




BAPSCARCARE GEL is op recept verkrijgbaar bij de apotheek in een tube van 20 gram.

Lees de bijsluiter voor gebruik.

Voor meer informatie: www.bap-medical.com

BAPSCARCARE T DUN SILICONENVERBAND

BAPSCARCARE T is een zelfklevend, dun en transparant siliconenverband voor de behandeling van zowel oude als verse littekens. BAPSCARCARE T is met name geschikt voor grotere littekens en littekens onder kleding. Het is raadzaam om het gebruik van het siliconenverband in de eerste week stapsgewijs op te voeren tot 20 à 24 uur per dag. Dit om de huid te laten wennen.

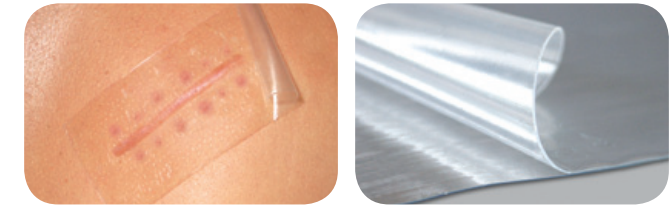

BAPSCARCARE T

- Is eenvoudig en gemakkelijk in gebruik
- Hoeft tussentijds niet gereinigd te worden
- Is nagenoeg onzichtbaar
- Blijft uitstekend zitten
- Vormt zich naar de contouren van de huid



BAPSCARCARE T is op recept verkrijgbaar bij uw apotheek in de volgende afmetingen: 5x7 cm, 10x15 cm en 5x30 cm (10 stuks per verpakking). Eén verpakking is goed voor 1 à 2 maanden therapie.

Lees de bijsluiter voor gebruik.

BAPSCARCARE T is de nieuwe naam voor Activ'M
Voor meer informatie: www.bap-medical.com