






MIRO GEL

Hydrogel extra dik in een handige knijptube

| MIRO GEL | | |
|-------------------------|---|--|
| type wond | doel van de behandeling | hoeveelheid wondvocht |
| ○ NECROTISCHE WOND | - <i>necrose verwijderen</i> | |
| ● EXSUDERENDE WOND | - <i>wond reinigen</i> - <i>vochtbalans herstellen</i> | droge wond  ● |
| GEÏNFECTEERDE WOND | - <i>wond reinigen</i> - <i>vochtbalans herstellen</i> - <i>infectie bestrijden</i> | licht exsuderende wond  ● |
| GRANULERENDE WOND | - <i>granulatie ondersteunen</i> - <i>vochtbalans controleren</i> - <i>wond(bodem) beschermen</i> | matig exsuderende wond  |
| EPITHELIALISERENDE WOND | - <i>wond(bodem) beschermen</i> - <i>vochtbalans controleren</i> | zwaar exsuderende wond  |



BESCHRIJVING MIRO GEL

Miro-Gel zorgt voor een vochtig wondmilieu ter bevordering van het genezingsproces. De gel biedt gebruiksgemak door de extra lange canule van de knijptube gecombineerd met een dikke vloeibare gel. De hydrogel is geschikt voor het verwijderen van necrotisch weefsel bij droge en licht exsuderende wonden. Miro-Gel is transparant, kleurloos en steriel.

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT EN BEHANDELAAR

- Eenvoudig aan te brengen - handige knijptube met lange canule
- Gel blijft goed zitten - extra dikke gel
- Minimale verbandwissel - gel kan 3 dagen in de wond blijven
- Verminderde pijn - verkoelend effect door water in de hydrogel
- Gemakkelijk te verwijderen - geringe verkleving aan de wond
- Geen verweking van de wondrand - vochtabsorberende werking

EIGENSCHAPPEN

- Verweking van droog necrotisch weefsel
- Reiniging van de wond
- Oplossen van dood, beschadigd of geïnfecteerd weefsel van droge wonden
- Absorptie van de fibrinelaag en exsudaat van matig vochtige wonden
- Miro-Gel is uitstekend te combineren met Miro-Film

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Miro-Gel is geschikt voor het verwijderen van necrose bij droge en licht exsuderende zwarte wonden met als doel het wondbed optimaal te prepareren voor verdere behandelingen.

HYDROGEL

| product | inhoud | verpakkingseenheid |
|----------|--------------|--------------------|
| MIRO GEL | Tube 15 gram | 5 stuks |