


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



# MIRO HYDROFOAM T (thin)

Zeer dun en flexibel schuimverband

MIRO HYDROFOAM T		
type wond	doel van de behandeling	hoeveelheid wondvocht
NECROTISCHE WOND	- necrose verwijderen	
● EXSUDERENDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen	droge wond 
GEÏNFECTEERDE WOND	- wond reinigen - vochtbalans herstellen - infectie bestrijden	licht exsuderende wond 
○ GRANULERENDE WOND	- granulatie ondersteunen - vochtbalans controleren - wond(bodem) beschermen	matig exsuderende wond 
EPITHELIALISERENDE WOND	- wond(bodem) beschermen - vochtbalans controleren	zwaar exsuderende wond 



## BESCHRIJVING MIRO HYDROFOAM T

Hydrofoam T biedt optimaal draagcomfort door de zeer dunne structuur gecombineerd met een hoge absorptiecapaciteit. Miro-Hydrofoam T is geschikt voor matig exsuderende wonden. Miro-hydrofoam T is zeer dun, zelfklevend, steriel, semi-doorlatend en hypoallergeen.

## VOORDELEN VOOR DE PATIËNT EN BEHANDELAAR

- Duidelijke indicatie voor verbandwissel - de dunne structuur van het verband maakt een visuele beoordeling voor een verbandwissel mogelijk
- Ideaal voor gewrichten en extremiteiten - uiterst dun, flexibel en vormt zich naar de contouren van de huid
- Verbandwissel schoon en minder pijnlijk - verband laat geen residu achter en verkleeft niet aan de wond
- Gebruiksvriendelijk - het verband is zelfklevend en duurzaam

## EIGENSCHAPPEN

- Miro-Hydrofoam T bestaat uit een viertal lagen
- Een zelfklevende hypoallergene laag - het verband kleeft aan de gezonde huid en niet aan de wond
- Een droge absorberende hydrogellaag - de gel wordt door het exsudaat geactiveerd en zorgt voor evenwicht in het wondmilieu gedurende 7 dagen.
- Een geweven polyesterlaag - deze laag geeft stevigheid en flexibiliteit waardoor het verband intact blijft, ook bij intensief contact met exsudaat
- Een toplaag - lucht en waterdamp doorlatend, ondoordringbaar voor vocht en bacteriën

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

Miro-Hydrofoam T is geschikt voor licht tot matig exsuderende gele en rode wonden. Het verband ondersteunt de wondgranulatie en herstelt en controleert de vochtbalans.

## CALCIUM ALGINAAT MET HYDROCOLLOÏD VEZELS (CMC)

### HYDROACTIEF SCHUIMVERBAND (dun en flexibel)

product	afmetingen	verpakkingseenheid
MIRO HYDROFOAM T (thin)	10 x 10 cm	10 stuks